 **Manufacturer:**  
Suretex Limited 31/1  
Moo 4, Suratthani –  
Thakuapha Road,  
Tambon Khao,  
Hua Kwai, Amphur  
Phunphin, Suratthani  
84130, Thailand

**Authorized  
Representative  
in EU:** Unimil Sp.  
z o.o., ul.  
Kamieńskiego 47,  
30-644 Krakow,  
Poland

**Distributor:**  
MAPA GmbH,  
Industriestraße  
21–25,  
27404 Zeven,  
Germany,  
www.billy-boy.de

# BILLY BOY

Artikel-Nr. 11.520.135

Rev. 13 (2020-03)



CE 0086

**MD** Medizinprodukt (EU) No. 2017/745

SKYN® und FEEL EVERYTHING™ sind eingetragene Marken der LifeStyles Healthcare Pte Ltd.

## WICHTIGE HINWEISE

Kondome sind grundsätzlich vorsichtig zu behandeln.

Beachten Sie bitte das auf der Verpackung und den Siegelbriefchen angegebene Haltbarkeitsdatum – nach Ablauf sollte das Kondom nicht mehr verwendet werden! Kondome kühl, trocken und vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Kondome greifen nicht in den Organismus ein und erzeugen keine Nebenwirkungen.

BILLY BOY SKYN Kondome sind aus Polyisopren hergestellt. BILLY BOY SKYN Kondome sind frei von Naturkautschuklatex und geeignet für Menschen mit einer bekannten oder vermutlichen Latexallergie. Bei Beschwerden oder Reizungen verwenden Sie das Kondom nicht weiter und fragen Sie bitte Ihren Arzt um Rat. Jedes Kondom wird einzeln elektronisch geprüft. Bei richtiger Anwendung schützen BILLY BOY-Kondome vor Schwangerschaft und Übertragung von Krankheitserregern. Kein Verhütungsmittel kann allerdings zu 100% den Schutz vor Schwangerschaft oder Infektionskrankheiten garantieren. Falls das Kondom während des Gebrauchs reißen oder platzen sollte, suchen Sie schnellstmöglich, jedoch innerhalb von 72 Stunden, einen Arzt auf. Bitte melden Sie alle schwerwiegenden Vorfälle in Bezug auf das Produkt dem Hersteller und Ihrer zuständigen nationalen Behörde.

# Hautnah. Alles spüren.

## GEBRAUCHSHINWEISE

### BILLY BOY – FÜR JEDEN DAS PASSENDE PRODUKT:


Ihr zwei. Haut an Haut. Ganz nah. Was gibt es schöneres? Mit BILLY BOY SKYN Hautnah spürt ihr euch noch intensiver! Und macht eure gemeinsamen Momente mit Sicherheit zu einem gefühlsintensiven Erlebnis. Das innovative latexfreie Material Polyisopren ist besonders anschiemgsam und lässt euch das einmalige Hautnah-Gefühl erleben.

BILLY BOY SKYN Hautnah – ein ultrasinnlicher Genuss.

Egal wann, wie oder wo: Liebt euch – so wie ihr es wollt. Mit dem vielfältigen Sortiment aus Kondomen, Gleitgelen sowie verschiedenen Toys bietet BILLY BOY alles was anmacht.



## 1. AUFREISSEN

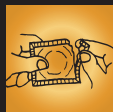

Die Siegelfolie vorsichtig an einer der Zacken öffnen. Die Siegelfolie kann so sauber aufgerissen werden, ohne das Kondom zu beschädigen. Vorsicht: Mit scharfkantigen Gegenständen, Schmuck oder spitzen Fingernägeln könnten Sie das Kondom beschädigen. Niemals Kondome aus beschädigten oder bereits geöffneten Siegelbriefchen verwenden!

## 2. VORSPIEL



Halten Sie das Reservoir so mit Daumen und Zeigefinger fest, dass dort kein Luftpolster entsteht. Ziehen Sie die Vorhaut zurück und rollen Sie das Kondom vom Reservoir her vollständig über den steifen Penis, bevor es zur ersten Berührung zwischen Penis und Körper des Partners kommt. Nur so kann das Kondom bei der Verhinderung von sexuell übertragbaren Infektionen und von Schwangerschaft unterstützend wirken. Lässt sich ►

das Kondom nicht leicht abrollen ist die Abrollrichtung falsch. In diesem Fall Kondom nicht umdrehen und erneut benutzen, da sonst Körpersekrete auf den Partner übertragen werden. Verwenden Sie ein neues Kondom und beachten Sie die Abrollrichtung. Wenn Sie merken, dass das Kondom abrutscht oder spannt, prüfen Sie es auf eventuelle Beschädigungen, da dies zu einem Riss führen kann.

## 3. NACHSPIEL



Vor Erschlaffung das Glied herausziehen! Halten Sie dafür das Kondom am Penisansatz fest, so verhindern Sie ein Abrutschen des Kondoms.

## 4. ENTSORGUNG

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfalleimer, nicht in die Toilette. Waschen Sie Penis und Hände, bevor Sie mit dem Liebesspiel fortfahren. Kondome sind ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt!

## VORSICHT!

Bei manchen hochempfindlichen Personen können Inhaltsstoffe dieser Kondome allergische Reaktionen auslösen. Tritt eine Reizung oder ein Brennen auf, stellen Sie den Gebrauch dieses Kondoms ein und suchen Sie einen Arzt auf. Kondome nicht zusammen mit öl- oder fetthaltigen Gleitmitteln (z.B. Vaseline, Babyöle, Körperlotion, Massageöle, Speisefette) verwenden. Diese greifen das BILLY BOY SKYN Kondom aus Polyisopren an und lassen es schnell zerreißen. Falls Sie Gleitmittel verwenden, müssen diese als für den Gebrauch mit Kondomen geeignet ausgewiesen sein. Vor der Anwendung von Gleitgel bitte die Gebrauchshinweise auf der Verpackung beachten. Keine Gleitmittel direkt auf den Penis oder die Innenseite des Kondoms auftragen, hierdurch erhöht sich das Risiko, dass das Kondom abrutscht oder reißt. Bei analer Verwendung sollten Sie immer zusätzlich ein Gleitmittel auf das Kondom auftragen, um die Gefahr des Reißens oder Abrutschens des Kondoms zu verringern. Bei Verwendung von Scheidenzäpfchen bitte die jeweilige Gebrauchsanweisung beachten. Werden im Bereich von Penis ►

und Vagina rezeptpflichtige oder rezeptfreie Medikamente (Salben, Gele) angewendet, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker nach der Verträglichkeit des Medikaments mit Kondomen. Vorsicht: Intimschmuck kann das Kondom beschädigen. Kondome sind ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt. Die mehrmalige Verwendung reduziert deren Sicherheit und kann zu ungewollter Schwangerschaft und/oder einer Infizierung mit HIV oder ansteckenden Geschlechtskrankheiten führen. Vor jedem Wechsel der Sexualpraktiken (vaginal, anal, oral) ein neues Kondom verwenden.

PERSÖNLICHE UND ANONYME TELEFONBERATUNG ZUM THEMA SAFER SEX UND VERHÜTUNG ETC.:

### Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

- Täglich ab 10.00 Uhr unter 01805/555444 (0,14 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz, maximal 0,42 Euro/Min. aus dem Mobilfunknetz)
- telefonberatung@bzga.de oder [www.aidsberatung.de](http://www.aidsberatung.de)