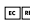


 Manufacturer: Suretex Limited 31/1 Moo 4, Suratthani - Thakuapha Road, Tambon Khao Hua Kwai, Amphur Phunphin, Suratthani 84130, Thailand


 Importer: LifeStyles Europe SAS 4-6 Rue des Chaffours CS 70006 95095 Cergy Cedex, Frankreich

 EC REPRESENTATIVE: SKWell Belgium, Lenniksebaan 451/35 1070 Anderlecht, BELGIUM

 Country of origin - INDIA

 Distributor: Newell Brands Germany GmbH Industriestr. 21-25 27404 Zeven, Germany www.billy-boy.de

Material-Nr. 11520193 (2026-04)

 Medizinprodukt (EU) No. 2017/745

CE2797
ISO 23409:2011

SKYN® und FEEL EVERYTHING™ sind eingetragene Marken der LifeStyles Healthcare Pte Ltd.


WICHTIGE HINWEISE


BILLY BOY SKYN Kondome

Verwendungszweck: zur Empfängnisverhütung und zum Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten.

 Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig durchlesen.


Kondome sind grundsätzlich vorsichtig zu behandeln.

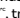Kondome kühl, , trocken  und vor Hitze  und direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Beachten Sie bitte das auf der Verpackung und den Siegelbriefchen angegebene Haltbarkeitsdatum  - nach Ablauf sollte das Kondom nicht mehr verwendet werden!

BILLY BOY SKYN Kondome sind aus Polyisopren hergestellt.

BILLY BOY SKYN Kondome sind frei von Naturkautschuklatex und geeignet für Menschen mit einer bekannten oder vermutlichen Latexallergie. Bei Beschwerden oder Reizungen verwenden Sie das Kondom nicht weiter und fragen Sie bitte Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin um Rat.

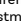Jedes Kondom wird einzeln elektronisch geprüft. Die richtige Verwendung von Kondomen senkt das Risiko einer ungewollten Schwangerschaft und Ansteckung mit Geschlechtskrankheiten wie HIV/AIDS. Kondome bieten einen wirksamen Schutz vor Schwangerschaft und Geschlechtskrankheiten. Aber wie bei allen Verhütungsmitteln kann ein 100%iger Schutz nicht garantiert werden. Falls Sie ungeschützten Geschlechtsverkehr haben oder falls das Kondom während des Gebrauchs reißen oder platzen sollte, suchen Sie bitte schnellstmöglich, jedoch innerhalb von 72 Stunden, einen Arzt bzw. eine Ärztin auf.  Bitte melden Sie alle schwerwiegenden Vorfälle in Bezug auf das Produkt dem Hersteller und Ihrer zuständigen nationalen Behörde. Genießen Sie Haut-an-Haut Gefühl mit BILLY BOY SKYN Hautnah. Das latexfreie Material Polyisopren ist besonders anschmiegsam und lässt euch das einmalige Hautnah-Gefühl erleben.

BILLY BOY

GEBRUCHSHINWEISE



VORSICHT

Gefahr bei Wiederverwendung von Kondomen: Kreuzinfektion, Undichtigkeit durch Reinigung, Verlust der Gleitfähigkeit und eine erhöhte Gefahr des Reißens.

Alle diese Faktoren erhöhen das Risiko einer Schwangerschaft oder der Übertragung einer Geschlechtskrankheit.

Bei manchen hochempfindlichen Personen können Inhaltsstoffe dieser Kondome allergische Reaktionen auslösen.

Tritt eine Reizung oder ein Brennen auf, stellen Sie den Gebrauch dieses Kondoms ein und suchen Sie einen Arzt bzw. eine Ärztin auf.

Verwenden Sie keine auf Öl basierten Gleitmittel, wie Massageöl, Körperlotionen, Babyöl, Butter, Margarine, Vaseline usw., da Polyisopren-Kondome durch ölhaltige Substanzen beschädigt werden können.

Falls Sie Gleitmittel verwenden, müssen diese als für den Gebrauch mit Kondomen geeignet ausgewiesen sein.

Vor der Anwendung von Gleitmitteln bitte die Gebrauchshinweise auf der Verpackung beachten.

Keine Gleitmittel direkt auf den Penis oder die Innenseite des Kondoms auftragen, hierdurch erhöht sich das Risiko, dass das Kondom abrutscht oder reißt.


Nicht vaginale Verwendung von Kondomen, d.h. Oralsex (da die Zähne das Kondom beschädigen können) und Analsex (da es an natürlicher Gleitfähigkeit mangelt kann), erhöht das Abrutsch- und Beschädigungsrisiko.

Bei Verwendung von Scheidenzäpfchen bitte die jeweilige Gebrauchsanweisung beachten.


Werden im Bereich von Penis und Vagina rezeptpflichtige oder rezeptfreie Medikamente (Salben, Gele) angewendet, fragen Sie bitte Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin oder Ihren Apotheker bzw. Ihre Apothekerin nach der Verträglichkeit des Medikaments mit Kondomen.

Vor jedem Wechsel der Sexualpraktiken (vaginal, anal, oral) oder Partner bzw. Partnerinnen immer ein neues Kondom verwenden.

1.

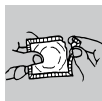

Die Siegelfolie vorsichtig an einer der Zacken öffnen. Die Siegelfolie kann so sauber aufgerissen werden, ohne das Kondom zu beschädigen.

Vorsicht: Mit scharfkantigen Gegenständen, Schmuck oder spitzen Fingernägeln könnten Sie das Kondom beschädigen. Ist das Haltbarkeitsdatum abgelaufen oder die Verpackungsfolie  beschädigt, nicht das darin befindliche Kondom, sondern ein anderes mit einer unbeschädigten Verpackungsfolie verwenden. Verwenden Sie nie mehr als ein Kondom auf einmal.

2.



Halten Sie das Reservoir so mit Daumen und Zeigefinger fest, dass dort kein Luftpolster entsteht, um Raum für das Auffangen des Spermaz zu schaffen. Im Reservoir eingeschlossene Luft erhöht das Risiko einer Beschädigung des

Kondoms. Ziehen Sie die Vorhaut komplett zurück und rollen Sie das Kondom vom Reservoir her vollständig über den steifen Penis, bevor es zur ersten Berührung zwischen Penis und Körper des Partners bzw. der Partnerin kommt. Prüfen Sie die korrekte Position des Kondoms. Rollen Sie es dann bis zur Peniswurzel ab. Nur so kann das Kondom bei der Verhinderung von sexuell übertragbaren Infektionen und von Schwangerschaft unterstützend wirken. Lässt sich das Kondom nicht leicht abrollen, ist die Abrollrichtung falsch. Verwenden Sie ein neues Kondom und beachten Sie die Abrollrichtung. Wenn Sie merken, dass das Kondom abrutscht oder spannt, prüfen Sie es auf eventuelle Beschädigungen, da dies zu einem Riss führen kann.


3.

Ziehen Sie nach der Ejakulation und vor Erschlaffung das Glied vorsichtig aus der Vagina. Zur Vermeidung eines Auslaufens des


Spermaz halten Sie das Kondom an der Basis fest. Drücken Sie den Penis nach unten und entfernen Sie das Kondom.



4.

Verknöten Sie das gebrauchte Kondom, wickeln Sie es in ein Papiertuch und entsorgen Sie es hygienisch. Nicht in die Toilette werfen. Waschen Sie Penis und Hände, bevor Sie mit dem Liebespiel fortfahren. Kondome sind ausschließlich für den Einmalgebrauch  bestimmt!

HINWEISSYMBOLE

-  Gebrauchsanleitung
-  Kondome sind ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt!
-  Kondome nicht verwenden, wenn die Verpackungsfolie beschädigt ist. Gebrauchshinweise beachten
-  Kondome vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
-  Kondome trocken lagern
-  Kondome kühl lagern
-  Haltbarkeitsdatum
-  Chargennummer Kondome
-  Chargennummer Packung
-  Medizinprodukt
-  Artikelnummer Packung
-  Hersteller
-  Herstellerland - INDIA
-  Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft
-  Importer
-  Distributor