

## Hinweise

Kondome sind grundsätzlich vorsichtig zu behandeln, beachte dabei in jedem Fall das angegebene Haltbarkeitsdatum. Nach Ablauf darf das Kondom nicht mehr verwendet werden.

Beachtet bei der Verwendung zusätzlicher Gleitmittel wie Vaseline, Babyöle, Körperlotion, Massageöle oder Speisefette bitte, dass diese das Kondom angreifen und schnell zerreißen lassen. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Verwendet daher nur Gleitmittel, die vom jeweiligen Hersteller für den Gebrauch mit Kondomen zugelassen sind. Vor der Anwendung von Gleitgel bitte immer die Gebrauchshinweise auf der Verpackung beachten.

### Hauptsache ihr liebt euch sicher.

Bei der Verwendung von Gleitmitteln immer drauf achten, dass es für die Nutzung mit Latex Kondomen zugelassen ist. Denn richtig angewendet tragen Gleitmittel dazu bei, die Reiß oder Abrutschgefahr des Kondoms zu verringern. Dies gilt vor allem bei analer Verwendung bei der immer ein Gleitmittel verwendet werden sollte. Richtig angewendet heißt: Gleitgel immer nur außen auf das angezogene Kondom auftragen, bitte **niemals** direkt auf den Penis oder die Innenseite des Kondoms! Probier doch gerne einmal unser **BILLY BOY** Gleitgel aus. Bei Verwendung von Scheidenzäpfchen bitte die Gebrauchsanweisung beachten. Im Falle der Anwendung von Medikamenten wie Salben und Gele im Bereich von Penis und Vagina fragt bitte vor der Verwendung von Kondomen euren Arzt oder Apotheker.

Besondere Vorsicht unbedingt bei Intimschmuck, egal ob, bei ihm oder ihr. Kondome nur einmal verwenden! Mehrmalige Verwendung erhöht das Risiko der Kondombeschädigung, was zu ungewollter Schwangerschaft und/oder einer Infizierung mit HIV oder ansteckenden Geschlechtskrankheiten führen kann!

Wenn ihr vorhabt zwischendurch die Sexualpraktiken (vaginal, anal, oral) zu wechseln, immer ein neues Kondom verwenden. Kondome kühl, trocken, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern! Immer Hinweise ernst nehmen, vor allem solche die mit einem Ausrufezeichen enden! Kondome greifen nicht in den Organismus ein und erzeugen keine Nebenwirkungen. Unverträglichkeiten wie Latex-Allergie bis hin zu einem anaphylaktischen Schock können dennoch auftreten. Bei anhaltenden Beschwerden gilt immer: Ab zum Arzt! – Falls das Kondom während des Gebrauchs reißt oder platzt sogar schnellstmöglich, also innerhalb von 72 Stunden.

## Prüfung

Jedes Kondom wird einzeln elektronisch vorgeprüft. Zwei Roboter suchen sich dafür ein stilles Plätzchen und... nein, viel komplizierter. Richtig angewendet schützen **BILLY BOY** Kondome vor Befruchtung und Übertragung von Krankheitserregern. Kein Verhütungsmittel kann allerdings zu 100% den Schutz vor Schwangerschaft oder Infektionskrankheiten garantieren.

Falls noch Fragen offen sind: Ausführliche Gebrauchshinweise liegen jedem **BILLY BOY** Kondom bei.

Genug erzählt, denn  
Hauptsache ihr **liebt euch!**

**BILLY BOY®** liebt euch und die Umwelt.  
Wir unterstützen Naturschutzprojekte zum Erhalt natürlicher Lebensräume. Weitere Infos findet ihr auf: [www.billy-boy.de](http://www.billy-boy.de)



**MAPA GmbH** Industriestraße 21 – 25  
27404 Zeven, Germany



MADE IN  
GERMANY  
FOR SEX

Materialnr.: 11591499

# liebt euch sicher




**BILLY BOY®**

# Anwendung

## 1. AUFREISSEN

Die Siegelolie vorsichtig an der gekennzeichneten Stelle („open here“) öffnen. Hierbei wird das Kondom nämlich nicht beschädigt. Aber Vorsicht: scharfkantige Gegenstände, Schmuck oder spitze Fingernägel können das Kondom sehr wohl beschädigen! Niemals Kondome aus beschädigten oder bereits geöffneten Siegelbriefchen verwenden!

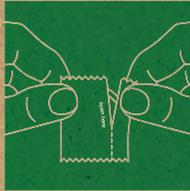


## 2. EINFACH DRAUF

Das Reservoir (ja genau, diese lustige Zipfelmütze am Kondom) so mit Daumen und Zeigefinger festhalten, dass dort kein Luftpolster entsteht. Die Vorhaut am Penis komplett zurückziehen und das Kondom vom Reservoir her vollständig über den steifen Penis rollen, bevor es zur ersten Berührung zwischen Penis und Körper deines/ deiner Partners/ Partnerin kommt. Sollte klar sein, muss man aber immer wieder sagen. Lässt sich das Kondom nicht leicht abrollen ist die Abrollrichtung falsch. In diesem Fall das Kondom nicht umdrehen, weil die Gefahr des Kontakts mit Körperflüssigkeiten besteht („man sieht doch gar kein Sperma!“ bedeutet bei Kondomen überhaupt nichts). Bitte ein neues Kondom verwenden und diesmal die Abrollrichtung genau im Auge behalten (Zipfelmütze oben). Wenn Ihr merkt, dass das Kondom abrutscht oder spannt, prüft es auf eventuelle Beschädigungen, da dies zu einem Riss führen kann.



## 3. NACHSPIEL

Bevor er komplett schlappmacht, den Penis unbedingt rechtzeitig herausziehen! Hierbei das Kondom am Penisansatz festhalten, während du den Penis behutsam herausziehst. Ganz légère, wie die Franzosen sagen. So verhinderst du ein Abrutschen des Kondoms.

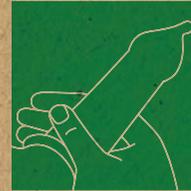

## 4. ENTSORGUNG

Gebrauchte Kondome gehören... richtig, nicht in die Toilette, sondern in den Abfalleimer! Danach Penis und Hände waschen, vor allem wenn es mit dem Liebesspiel weitergehen soll. Kondome sind ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt!



# liebt euch safe

# Kondomwissen

Die Buchstabierampel steht auf GRÜN:

- K** kann man sich gut merken, weil es für die beiden Dinge steht, vor denen ein Kondom schützt: Krankheiten und Kinder kriegen.
- O** wie OMG, unglaublich, wie oft sich Männer bezüglich der Größe ihres Penis irren. Viele Missgeschicke beim Sex resultieren aus der Verwendung zu großer, abrutschender Kondome. Beim Kauf gilt also: Lieber kleiner denken!
- N** wie nahtlose Qualitätskontrolle nach strengen EN ISO-Normen. Das ist der langweilige Teil, der früher in Broschüren stand und allen die Lust am Sex geraubt hat. Halten wir einfach fest: **BILLY BOY** steht für eine megamäßige Qualität.
- D** wie die ersten Kondome aus Tierdärmen, Stoff oder Seidenpapier. Die waren weder richtig wirksam noch cool. Man stelle sich mal vor, so irgendwann im 18. Jahrhundert; man findet sich ganz toll und dann fragt einer: „Hast du’n Schafsdarm dabei“? Nää.
- O** wie oh, Mist, noch ein O. Tun wir so, als wär’s noch ein K, dann können wir hier nämlich die tolle Info unterbringen, dass Kondome wo am besten aufbewahrt werden? Kein Witz, im Kühlschrank. Also bitte mal den O-Saft beiseite räumen. Eine Nachtschublade tut’s aber auch. Ein Portemonnaie ist aufgrund der Reibung bspw. keine gute Idee.
- M** wie Medizinprodukt. Das klingt jetzt vielleicht überraschend, denn bei Medizin denkt man ja zuerst an Apotheken und Ärzte, aber auch Kondome unterliegen strengen Richtlinien. Dazu zählt unter anderem, dass diese nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwendet werden dürfen. **Also ganz wichtig:** Achtet immer auf das Haltbarkeitsdatum, welches ihr hinten auf dem Siegelbriefchen findet.