

REF 33.100.500 DENT-NR| xxxxxx



Verwendbar bis 20xx-xx

Rev. 14 (2023-05)



MAPA GmbH Industriestraße 21-25, 27404 Zverin, Germany

www.billy-boy.de



1 Kondom

BILLY BOY®

1 Kondom BILLY BOY Extra Feucht, hergestellt aus Naturkautschuk-

latex mit Gleitfilm und Reservoir, Glatte, zylindrische Form,

transparent. Breite des flachliegenden Kondoms: 52 mm.

BILLY BOY - Kondome sind Medizinprodukte zur Empfängnisverhütung

und zum Infektionsschutz; international anerkannte Fertigungsstan-

-dards und ständige Labortests sind die Grundlage für die

Qualität und Sicherheit von BILLY BOY - Kondomen. Kondome sind

dermatologisch getestet und jedes Kondom wird einzeln, elektronisch











geprüft.

Kein Verhütungsmittel kann allerdings zu 100 % den Schutz vor Schwan-

gerschaft oder Infektionskrankheiten garantieren. Kondome nie mit öl-

oder fetthaltigen Gleitmitteln verwenden.

Bitte beachten Sie die nachstehenden Hinweis-Symbole auf der Verpackung:

-  Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig lesen.
-  Kondome vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen.
-  Kondome trocken lagern.
-  Kondome nur aus unbeschädigten Verpackungsfolien verwenden.
-  Kondome sind ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt!
-  Kondome aus Naturkautschuklatex
-  Medizinprodukt (EU) 2017/745
-  Hersteller
-  Chargennummer
-  Verwendbar bis

ⓘ Anwendungshinweise



1. Aufreißen

Die Siegelfolie vorsichtig an der gekennzeichneten Stelle (→ open here-) öffnen. Die Siegelfolie kann so sauber aufgerissen werden, ohne das Kondom zu beschädigen. Vorsicht: Mit scharfkantigen Gegenständen, Schmuck oder spitzen Fingernägeln könnten Sie das Kondom beschädigen. Niemals Kondome aus beschädigten oder bereits offenen Siegelbriefchen verwenden!



2. Vorspiel

Halten Sie das Reservoir so mit Daumen und Zeigefinger fest, dass dort kein Luftpolster entsteht. Ziehen Sie die Vorhaut zurück und rollen Sie das Kondom vom Reservoir her vollständig über den steifen Penis, bevor es zur ersten Berührung zwischen Penis und Körper des Partners kommt. Lässt sich das Kondom nicht leicht abrollen, ist die Abrollrichtung falsch. In diesem Fall Kondom nicht umdrehen und erneut benutzen, da sonst Körpersekrete auf den Partner übertragen werden. Verwenden Sie ein neues Kondom und beachten Sie die Abrollrichtung. Wenn Sie merken, dass das Kondom abrutscht oder spannt, prüfen Sie es auf eventuelle Beschädigungen, da dies zu einem Riss führen kann.



3. Nachspiel

Vor Erschlaffung das Glied herausziehen! Halten Sie dabei das Kondom am Penisansatz fest, um ein Abrutschen des Kondoms zu verhindern.

Wichtige Hinweise:

Kondome sind grundsätzlich vorsichtig zu behandeln. Beachten Sie bitte das auf der Verpackung und den Siegelbriefchen angegebene Haltbarkeitsdatum – nach Ablauf das Kondom nicht mehr verwenden! Kondome kühl, trocken und vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Kondome greifen nicht in den Organismus ein und erzeugen keine Nebenwirkungen. Dennoch können Unverträglichkeiten in Form allergischer Reaktionen bis hin zu einem anaphylaktischen Schock auftreten, falls der Benutzer allergisch auf Latex reagiert. Bei Beschwerden oder Reizungen verwenden Sie das Kondom nicht weiter und fragen Sie bitte Ihren Arzt um Rat.

Bei richtiger Anwendung (siehe Anwendungshinweise) schützen BILLY BOY-Kondome vor Schwangerschaft und Übertragung von Krankheitserregern. Kein Verhütungsmittel kann allerdings zu 100% den Schutz vor Schwangerschaft oder Infektionskrankheiten garantieren. Falls das Kondom während des Gebrauchs reißen oder platzen sollte, suchen Sie schnellstmöglich, jedoch innerhalb von 72 Stunden, einen Arzt auf.

Bitte melden Sie alle schwerwiegenden Vorfälle in Bezug auf das Produkt dem Hersteller und Ihrer zuständigen nationalen Behörde.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfalleimer, nicht in die Toilette. Waschen Sie Penis und Hände, bevor Sie mit dem Liebespiel fortfahren. Kondome sind ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt!

Vorsicht:

Kondome nicht zusammen mit öl- oder fetthaltigen Gleitmitteln (z.B. Vaseline, Babyöle, Körperlotion, Massageöle, Speisefette) verwenden. Diese greifen das Kondom an und lassen es schnell zerreißen. Falls Sie Gleitmittel verwenden, müssen diese als für den Gebrauch mit Kondomen geeignet ausgewiesen sein. Vor der Anwendung von Gleitgel bitte die Gebrauchshinweise auf der Verpackung beachten. Keine Gleitmittel direkt auf den Penis oder die Innenseite des Kondoms auftragen, hierdurch besteht das Risiko, dass das

Kondom abrutscht oder reißt. Bei analer Verwendung sollten Sie immer zusätzlich ein Gleitmittel auf das Kondom auftragen, um die Gefahr des Reißens oder Abrutschens des Kondoms zu verringern (z.B. BILLY BOY Gleitgel). Bei Verwendung von Scheidenzäpfchen bitte die jeweilige Gebrauchsanweisung beachten. Werden im Bereich von Penis oder Vagina rezeptpflichtige oder rezeptfreie Medikamente (Salben, Gels etc.) angewendet, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker nach der Verträglichkeit des Medikaments mit Kondomen. Vorsicht: Intimschmuck kann das Kondom beschädigen. Kondome sind ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt. Die mehrmalige Verwendung reduziert deren Sicherheit und kann zu ungewollter Schwangerschaft und/oder einer Infizierung mit HIV oder ansteckenden Geschlechtskrankheiten führen. Vor jedem Wechsel der Sexualpraktiken (vaginal, anal, oral) ein neues Kondom verwenden. Persönliche und anonyme Beratung zum Thema Safer Sex und Verhütung: <https://www.liebesleben.de/>