

ANLEITUNG

Freie Flächen:

Alle freien Flächen, sowie die Hintergrundfarbe können individuell nach CMYK - Euroskala gestaltet werden. Anschnitt von **3 mm** beachten. Kennzeichnung berücksichtigen, Sonderfarben nur auf Anfrage.

Der Text auf der Frontseite „1 Kondom“ kann auf Wunsch auf der Vorderseite in einer anderen Ecke positioniert werden. Alle Kontur- und Falzlinien bitte weglassen! Gerne ohne Schneidemarken, Passermarken, Farbkontrolle oder sonstige Infos.

Die Stanzform darf gerne als Sonderfarbe in der Pdf bleiben.

Druckdaten:

PDF X-3 oder -4, JPG, TIFF oder EPS - Format, Vektordateien, mind. 300 dpi-Auflösung. Der angelegte Farbauftrag sollte bei max. 230 % liegen.

Wichtige Hinweise:

Die MAPA GmbH übernimmt keine Verantwortung für Rechtsverletzungen, die sich aus der Nutzung urheberrechtlich oder anderweitig geschütztem Material, das vom Auftraggeber/Kunde zur Gestaltung von Werbekondom-Packungen zur Verfügung gestellt oder auf seinen ausdrücklichen Wunsch eingesetzt wird, ergeben. Wir empfehlen daher dringend, Gestaltungselemente daraufhin zu überprüfen! Wir behalten uns jederzeit Layout- und Text-Änderungen der Pflichtangaben vor, sofern sie im Hinblick auf die Kennzeichnungspflicht von Medizinprodukten notwendig sind. Zur Druckfreigabe erhalten Sie automatisch eine nicht farbverbindliche PDF-Datei. Es erfolgt eine Prüfung der Druckdaten anhand unserer firmenpolitischen Richtlinien und Grundsätze und wir behalten uns die Ablehnung von Druckmotiven - auch ohne Angabe von Gründen - vor.

Rückseite (Innenseite) - nicht zur freien Gestaltung!

Alle Pflichtangaben und Gebrauchshinweise für Medizinprodukte, die auf der Verpackung gesetzlich vorgeschrieben sind, werden von uns 1-farbig in Schwarz (auf weißem Hintergrund) in Landessprache (Standard: DE) in der jeweils gültigen Fassung eingesetzt. Erläuterungen dazu finden Sie u.a. in den „Richtlinien zur Inverkehrbringung von Kondomen“. Sofern die Kondome exportiert werden sollen, müssen alle Pflichtangaben in der jeweiligen, offiziellen Landessprache angelegt werden. Bitte fragen Sie die Umsetzbarkeit und Verfügbarkeit der benötigten Landessprache im Vorfeld an.

Änderungswünsche bezüglich des Innenlayouts – z.B. das Einfügen einer Hintergrundfarbe oder Layout-Ergänzungen nach CMYK – sind mit Mehrkosten verbunden und müssen separat angefragt werden!

Material Nr. 11.525.029

BEACHTEN SIE BITTE DIE NACHSTEHENDEN HINWEISSYMBOLE

	ACHTUNG! Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig durchlesen		Diese Kondome sind aus Naturkautschuklatex hergestellt, und können bei Latex-Allergikern allergische Reaktionen einschließlich eines anaphylaktischen Schocks hervorrufen
	Nicht wiederverwenden Kondome sind ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt!		Chargennummer Kondom
	Kondome nicht verwenden, wenn die Verpackungsfolie beschädigt ist und Gebrauchsanweisung beachten		Chargennummer Packung
	Vor Sonnenlicht und Hitze schützen		Medizinprodukt
	Kondome trocken aufbewahren		Artikelnummer Packung
	Verwendbar bis		Hersteller

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Aufreißen: Die Siegelolie vorsichtig an der gekennzeichneten Stelle („OPEN HERE“) öffnen. Die Siegelolie kann so sauber aufgerissen werden, ohne das Kondom zu beschädigen. Vorsicht: Mit scharfkantigen Gegenständen, Schmuck oder spitzen Fingernägeln könnten Sie das Kondom beschädigen. Niemals Kondome aus beschädigten oder bereits geöffneten Siegelbriechen verwenden! Diese Kondome verwerfen!

2. Vorspiel: Halten Sie das Reservoir so mit Daumen und Zeigefinger fest, dass dort kein Luftpolster entsteht. Ziehen Sie die Vorhaut zurück und rollen Sie das Kondom vom Reservoir her vollständig über den steifen Penis, bevor es zur ersten Berührung zwischen Penis und Körper des Partners kommt. Lässt sich das Kondom nicht leicht abrollen, ist die Abrollrichtung falsch. In diesem Fall das Kondom nicht umdrehen und erneut benutzen, da sonst Körpersekrete auf den Partner übertragen werden. Verwenden Sie ein neues Kondom und beachten Sie die Abrollrichtung.

3. Nachspiel: Vor Erschlaffung das Glied herausziehen! Halten Sie dabei das Kondom am Penisansatz fest, um ein Abrutschen des Kondoms zu verhindern. Waschen Sie Penis und Hände, bevor Sie mit dem Liebespiel fortfahren. Gebrauchte Kondome gehören in den Abfallimer, nicht in die Toilette.

ZWECKBESTIMMUNG

Kondome aus Naturkautschuklatex für den Penis zur Verhütung ungewollter Schwangerschaften und sexuell übertragbarer Infektionskrankheiten.

ACHTUNG! WICHTIGE HINWEISE:

- Kondome kühl und trocken lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Kondome sind aus Naturkautschuklatex hergestellt und können eventuell allergische Reaktionen einschließlich eines anaphylaktischen Schocks hervorrufen.
- Kondome greifen nicht in den Organismus ein und erzeugen keine Nebenwirkungen. Sollten dennoch Beschwerden oder Reizungen auftreten, verwenden Sie das Kondom nicht weiter und fragen Sie bitte Ihren Arzt um Rat.
- Beachten Sie bitte das auf der Verpackung und den Siegelbriechen angegebene Haltbarkeitsdatum – nach Ablauf das Kondom nicht mehr verwenden!
- Bei richtiger Anwendung (s. Gebrauchsanweisung) unterstützen BILLY BOY Kondome bei der Vermeidung vor Schwangerschaft und Übertragung von Krankheitserregern. Jedoch kann kein Verhütungsmittel den Schutz vor Schwangerschaft oder Infektionskrankheiten zu 100% garantieren.
- Werden im Bereich von Penis und/oder Vagina rezeptpflichtige oder rezeptfreie Medikamente (Zäpfchen, Salben, Gele etc.) angewendet, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker nach der Verträglichkeit des Medikaments mit Kondomen und beachten Sie die jeweiligen Gebrauchshinweise.
- **Vorsicht:** Intimschmuck kann das Kondom beschädigen.
- Falls das Kondom während des Gebrauchs reißen oder platzen sollte, suchen Sie schnellstmöglich, jedoch innerhalb von 72 Stunden, einen Arzt auf.
- Kondome sind grundsätzlich vorsichtig zu behandeln.
- Kondome sind ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt. Die mehrmalige Verwendung reduziert deren Sicherheit und kann zu ungewollter Schwangerschaft und/oder einer Infizierung mit HIV oder ansteckenden Geschlechtskrankheiten führen.
- Vor jedem Wechsel der Sexualpraktiken (vaginal, anal, oral) und des Sexualpartners ein neues Kondom verwenden.

• Wenn Sie beim Gebrauch merken, dass das Kondom abrutscht oder spannt, prüfen Sie es auf eventuelle Beschädigungen, da dies zu einem Riss führen kann.

• Falls Sie Gleitmittel verwenden, müssen diese als für den Gebrauch mit Kondomen geeignet ausgewiesen sein. Kondome nicht zusammen mit öl- oder fetthaltigen Gleitmitteln (z. B. Vaseline, Babyöl, Körperlotion, Massageöl, Speisefette, Ausnahme Silikonöle) verwenden. Diese greifen das Kondom an und lassen es leicht zerreißen.

• Keine Gleitmittel direkt auf den Penis oder die Innenseite des Kondoms auftragen, hierdurch erhöht sich das Risiko, dass das Kondom abrutscht oder reißt.

• Bei analer Verwendung sollten Sie immer ein zusätzliches geeignetes Gleitmittel auf das Kondom auftragen, um die Gefahr des Reißens oder Abrutschens des Kondoms zu verringern (z. B. BILLY BOY Gleitgel).


• Jedes Kondom wird einzeln elektronisch geprüft.

Bitte melden Sie alle schwerwiegenden Vorfälle in Bezug auf das Produkt dem Hersteller und Ihrer zuständigen nationalen Behörde.

Persönliche und anonyme Beratung zum Thema safer sex und Verhütung: www.liebesleben.de

Hinweis:

Die gesamte Innenseite beinhaltet Pflichtangaben, die nicht verändert werden dürfen.

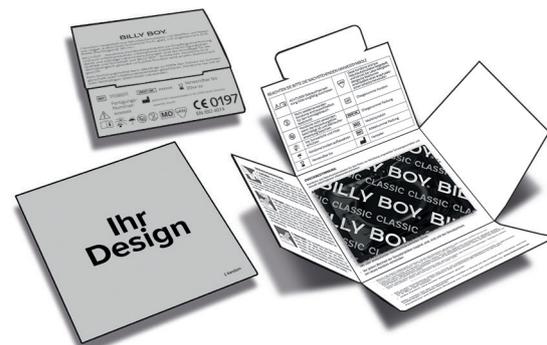

Ihr Design